

尿中乱用薬物検査キット

IVeX-screen® M-1

操作・判定例

操作手順



アルミ包装を開封し、スポイトとテストカードを取り出す。保護カバーを外し、水平な場所に置く。



付属のスポイトの0.5（一番上）のラインまで検体尿を吸い取る。



検体滴下窓に、スポイトの全量を一様に滴下する。
5～7分後に結果を判定する。

結果判定例

陽性 (+)

テスト領域のラインが**全く現れない項目のみ陽性**と判定




競合法のため、テストラインが現れない場合が陽性です

※ただし、検体の性状によってはラインが確認される可能性があります
疑わしい場合は精密検査をお奨めします


陰性 (-)

テスト領域のラインが**薄くても現れば陰性**と判定

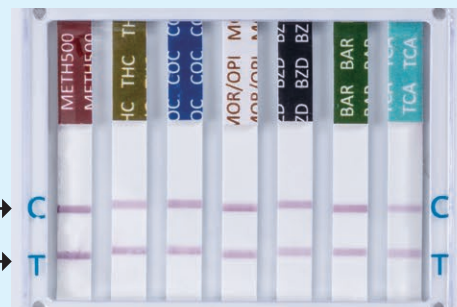

※コントロール領域 (C) にラインが現れない場合、結果は無効となります。

※検体を滴下してから**7分を超えての結果判定はしないでください**
(長時間放置すると薄いラインが確認される可能性があります)

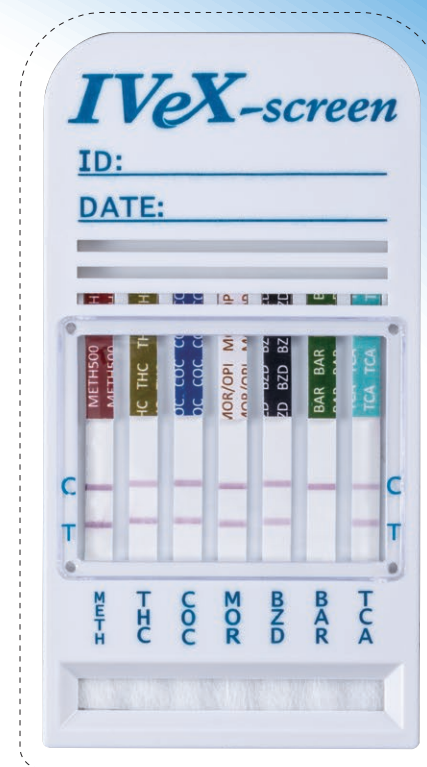

METH	THC	COC	MOR	BZD	BAR	TCA
覚せい剤	大麻	コカイン系麻薬	モルヒネ系麻薬	ベンゾジアゼピン系	バルビツール酸系	三環系抗うつ薬

◀ 結果の記録シートを使用する場合、ここにテストカードを裏返して置き、コピーしてください。

尿中乱用薬物検査キット

IVeX-screen® M-1

結果の記録

患者氏名 : _____ ID No. : _____

採取日時 : _____ 年 _____ 月 _____ 日 (AM ・ PM) _____ 時 _____ 分

測定者名 : _____ (日 付) _____ 年 _____ 月 _____ 日


確認者名 : _____ (日 付) _____ 年 _____ 月 _____ 日

Memo(服用薬物名等) : _____

METH	THC	COC	MOR	BZD	BAR	TCA
覚せい剤	大麻	コカイン系麻薬	モルヒネ系麻薬	ベンゾジアゼピン系	バルビツール酸系	三環系抗うつ薬
1	2	3	4	5	6	7

項目名	判定
1 METH 覚せい剤	+ / -
2 THC 大麻	+ / -
3 COC コカイン系麻薬	+ / -
4 MOR モルヒネ系麻薬	+ / -
5 BZD ベンゾジアゼピン系	+ / -
6 BAR バルビツール酸系	+ / -
7 TCA 三環系抗うつ薬	+ / -

結果判定例

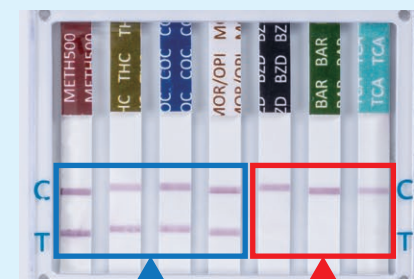

陰性(-)

陽性(+)

上のラインが1本のみ現れた場合が陽性です