


研究用試薬

尿中違法薬物検査

IVeX-screen® ID

アイベックス スクリーン® ID

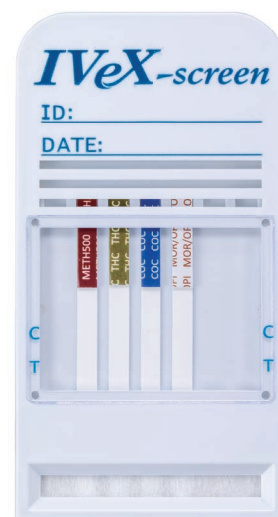

違法薬物を簡単に検査できます



診断書のエビデンスに

医師免許・薬剤師免許・調理師免許などは診断書の提出が義務付けられており薬物中毒者でないことの証明が必要です。当検査は、診断書のエビデンスに使用できます。



社員の安全管理に

バス・鉄道など安全に係る業務への薬物検査導入を国土交通省が推奨しています。健診に薬物検査を実施する企業が増えています。

アイベックス スクリーンは 尿中の違法薬物 4 種類を簡便に検出します



結果判定例


陽性 (+) テスト領域のラインが
全く現れない項目のみ陽性と判定



**競合法のため、
テストラインが現れない場合が陽性です**

※ただし、検体の性状によってはラインが確認される可能性があります
疑わしい場合は精密検査をお奨めします

陰性 (-) テスト領域のラインが
薄くても現れれば陰性と判定

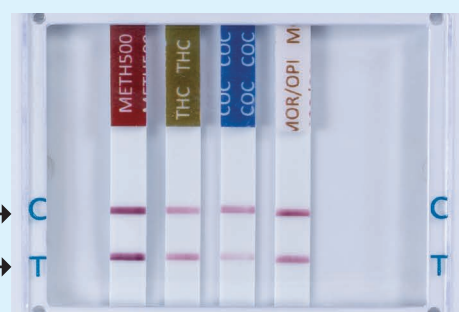

※コントロール領域(C)にラインが現れない場合、結果は無効となります。

※検体を滴下してから**7分を超えての結果判定はしないでください**
(長時間放置すると薄いラインが確認される可能性があります)

関連製品一覧

● 尿中乱用薬物検査試薬 マルチタイプ

製品コード	製品名	測定項目・基準値	規格	税抜価格	有効期間	貯法
180035	アイベックス スクリーン® ID	覚醒剤 : 500ng/mL	25 回用	48,000	24 ヶ月	8 ～ 35℃
180134		大麻 : 50ng/mL	5 回用	13,500		
		コカイン系麻薬 : 300ng/mL				
		モルヒネ系麻薬 : 300ng/mL				

※IVeX-screen® / アイベックス スクリーン®は株式会社バイオデザインの登録商標です



bioDESIGN

株式会社バイオデザイン
お問い合わせ : 03-5927-9377
<https://biodesign-int.jp/>