

2021年9月吉日

お客様 へ

株式会社バイオデザイン 営業本部 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 3-25-15 6F TEL 03-5927-9377

尿中非ベンゾジアゼピン系薬剤検出試薬

バイオスクリーン®Z3 発売のお知らせ

謹啓

初秋の候、お客様におかれましては、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度弊社は、尿中非ベンゾジアゼピン系薬剤検出試薬「バイオスクリーン® Z 3」を発売することになりましたので、お知らせ申し上げます。

バイオスクリーン®Z3 は、日本で多く処方されている睡眠薬 Zolpidem(ゾルピデム)をはじめとする、 Zaleplon(ザレプロン), Zopiclone(ゾピクロン)または、その薬物代謝産物を迅速に検出する試薬です。

引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

発売日: 2021年9月10日(金曜日)

	JAN ⊐−ド		制口力	規格	価格	保管	有効	区分	毒•	た唐
事業	業者コード	製品コード	製品名	7九代	(円)	温度	期間	运 第	劇物	在庫
49	987913	160211	バイオスクリーン® Z 3	25 回用	45,000	2~30℃	24ヶ月	研究用 試薬	該当無	通常 在庫

% バイオスクリーン 8 / BIO-SCREEN 8 は、株式会社バイオデザインの登録商標です。

以上

製品に関する、お問い合わせは、株式会社バイオデザイン 営業本部までお願い申し上げます。 TEL 03-5927-9377

製造元 Hangzhou AllTest Biotech CO., LTD

輸入販売元 株式会社バイオデザイン



尿中非ベンゾジアゼピン系薬剤検出試薬

バイオスクリーン®Z3

● 製品説明

- 1. 本製品は尿中の下記 3 種類の薬物または薬物代謝産物を迅速に検出できる試薬です。
- 2. 尿を滴下し、目視で判定するだけの簡易キットですので、特別な検査機器を必要としません。
- 3. 5分でスクリーニング結果がえられます。

略称		カットオフ値			
ZOL	Zolpidem	ゾルピデム	入眠剤	50ng/mL	
ZAL	Zaleplon	ザレプロン	催眠鎮静剤	100ng/mL	
ZOP	Zopiclone	ゾピクロン	睡眠障害改善剤	50ng/mL	

● 製品構成


製品規格	キット内容物 (1箱)
25 回用	1 ポーチ (テストカード 1 テスト・検体滴下用スポイト 1 個) × 25

ポーチ内容物




テストカード/スポイト

● 操作方法 (判定:ラインが出現しない場合、陽性)

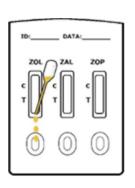

検体滴下部 3 か所に 検体を 3 滴 滴下

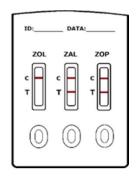

5分後に判定

JAN コード		制口力	規格	価格	保管	有効	区分	毒・	在庫
事業者コード	製品コード	製品名	况伯	(円)	温度	期間	运 第	劇物	1工/毕
4987913	160211	バイオスクリーン [®] Z 3	25 回用	45,000	2~30℃	24ヶ月	研究用 試薬	該当無	通常 在庫

[%] バイオ スクリーン $^{\otimes}$ / BIO-SCREEN $^{\otimes}$ は、株式会社バイオデザインの登録商標です。

製品に関する、お問い合わせは、株式会社バイオデザイン 営業本部までお願い申し上げます。 TEL 03-5927-9377