

# 3種類を同時検出

**Zolpidem**  
(ゾルピデム)

**Zaleplon**  
(ザレプロン)

**Zopiclone**  
(ゾピクロン)

〈研究用試薬〉

バイオスクリーン® Z3

# BIO-SCREEN® Z3

## 尿中非ベンゾジアゼピン系薬剤検出試薬

- 尿中の3種類の不眠症治療薬(ゾルピデム、ザレプロン、ゾピクロン)または、その代謝物を迅速に検出
- 尿を滴下し、目視で判定する簡易検査キット／判定に検査器機は不要
- 5分で結果判定が可能

株式会社バイオデザインは薬物検査を通じて  
安心安全な社会づくりに貢献します

※BIO-SCREEN® / バイオスクリーン®は株式会社バイオデザインの登録商標です



**bioDESIGN**

株式会社バイオデザイン  
お問い合わせ：03-5927-9377  
<https://biodesign-int.jp/>

## 尿中非ベンゾジアゼピン系薬剤検出試薬 バイオスクリーン<sup>®</sup> Z3

● 製品説明

1. 本製品は尿中の下記 3 種類の薬物または薬物代謝産物を迅速に検出できる試薬です。
2. 尿を滴下し、目視で判定するだけの簡易キットですので、特別な検査機器を必要としません。
3. 5 分でスクリーニング結果がえられます。

略称	スクリーニング項目			カットオフ値
ZOL	Zolpidem	ゾルピデム	入眠剤	50ng/mL
ZAL	Zaleplon	ザレプロン	催眠鎮静剤	100ng/mL
ZOP	Zopiclone	ゾピクロン	睡眠障害改善剤	50ng/mL

● 製品構成


規格	キット内容物 (1 箱)
25 回用	1 ポーチ (テストカード 1 テスト・検体滴下用スポイト 1 個) × 25

● ポーチ内容物




テストカード/スポイト

● 操作方法 (判定：ラインが出現しない場合、陽性)

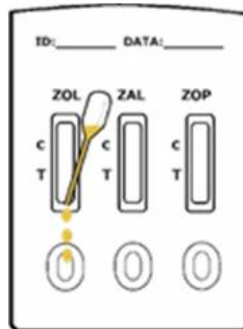

検体滴下部 3 か所に  
検体を 3 滴 滴下

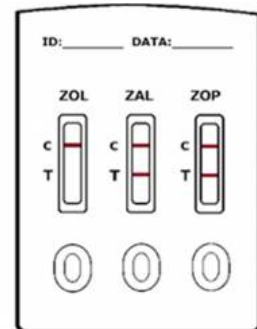

5 分後に判定

JAN コード		製品名	規格	価格 (円)	保管温度	有効期間	区分	毒・劇物	在庫
事業者コード	製品コード								
4987913	160211	<b>バイオスクリーン<sup>®</sup> Z3</b>	25 回用	45,000	2~30℃	24 ヶ月	研究用試薬	該当無	通常在庫

※ バイオ スクリーン<sup>®</sup> / BIO-SCREEN<sup>®</sup> は、株式会社バイオデザインの登録商標です。

製造元 Hangzhou AllTest Biotech CO., LTD  
輸入販売元 株式会社バイオデザイン

お問い合わせ先

株式会社バイオデザイン 営業本部  
〒171-0021 東京都豊島区西池袋 3-25-15 6F  
TEL 03-5927-9377  
<https://biodesign-int.jp/>

