

違法薬物が検出できるPOCTがあります

## 薬物検査を 実施する医療機関が増えています

医師免許・薬剤師免許など**診断書**の提出が義務付けられている  
**免許、資格**では、**薬物中毒者でない**ことの証明が必要です。

**国土交通省**は、バス、鉄道など安全にかかわる業務への  
**薬物検査を推奨**しています。

尿中違法薬物検査


**IVeX-screen® ID**  
アイベックス スクリーン® ID

1ステップ操作

7分で結果判定

診断書に記載してある違法薬物を、すべて確認できるPOCTです

バイオデザインでは、安心して製品をご利用いただくために、精密機器分析も行っております

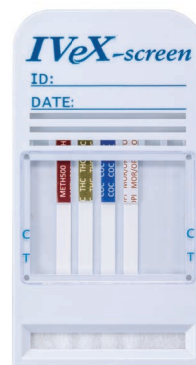

# アイベックス スクリーンは 尿中の違法薬物 4 種類を簡便に検出します



Multi  
4 items

**マルチテスト**  
尿中違法薬物を複数検出

Simple

**シンプルな検査**  
検体を滴下するだけの  
1ステップアッセイ

Speedy

**迅速測定**  
5~7分で結果判定

## 結果判定例

**陽性 (+)** テスト領域のラインが  
**全く現れない項目のみ陽性**と判定

**陰性 (-)** テスト領域のラインが  
**薄くても現れば陰性**と判定



**競合法のため、  
テストラインが現れない場合が陽性です**

※ただし、検体の性状によってはラインが確認される可能性があります  
疑わしい場合は精密検査をお奨めします

※コントロール領域(C)にラインが現れない場合、結果は無効となります。

※検体を滴下してから**7分を超えての結果判定はしないでください**  
(長時間放置すると薄いラインが確認される可能性があります)

## 製品一覧

### ● 尿中違法薬物検査試薬 マルチタイプ

製品コード	製品名	測定項目・基準値	規格	税抜価格	有効期間	貯法
180035	アイベックス スクリーン® ID	覚醒剤 : 500ng/mL	25 回用	48,000	24 ヶ月	8 ~ 35℃
180134		大麻 : 50ng/mL				
		コカイン系麻薬 : 300ng/mL	5 回用	13,500		
		モルヒネ系麻薬 : 300ng/mL				

**bioDESIGN**

株式会社バイオデザイン  
お問い合わせ : 03-5927-9377  
<https://biodesign-int.jp/>



※IVeX-screen® / アイベックス スクリーン®は株式会社バイオデザインの登録商標です

So-2022.1.10,000