

# 尿中乱用薬物検査キット


## IVeX-screen® M-1pro

### 操作・判定例

#### 操作手順



アルミ包装を開封し、スポイトとテストカードを取り出す。保護カバーを外し、水平な場所に置く。

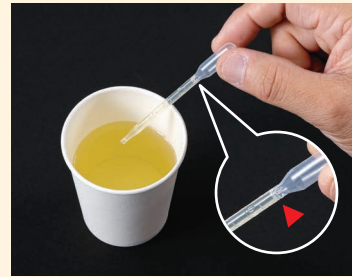

付属のスポイトの0.5(一番上)のラインまで検体尿を吸い取る。




検体滴下窓に、スポイトの全量を一様に滴下する。  
**5~7分後**に結果を判定する。

#### 結果判定例

**陽性 (+)**

テスト領域のラインが **全く現れない項目のみ陽性**と判定

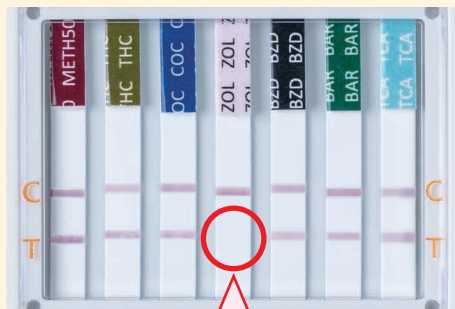

**競合法のため、テストラインが現れない場合が陽性です**

※ただし、検体の性状によってはラインが確認される可能性があります  
疑わしい場合は精密検査をお奨めします

**陰性 (-)**

テスト領域のラインが **薄くても現れば陰性**と判定



※コントロール領域(C)にラインが現れない場合、結果は無効となります。

※検体を滴下してから**7分を超えての結果判定はしないでください**  
(長時間放置すると薄いラインが確認される可能性があります)



METH	THC	COC	ZOL	BZD	BAR	TCA
覚醒剤	大麻	コカイン系麻薬	ゾルピデム	ベンゾジアゼピン系	バルビツール酸系	三環系抗うつ薬

◀ 結果の記録シートを使用する場合、ここにテストカードを裏返して置き、「コピー」してください。

# 尿中乱用薬物検査キット

## IVeX<sup>®</sup>-screen<sup>®</sup> M-1pro アイベックス スクリーン<sup>®</sup>

結果の記録

bioDESIGN

患者氏名 : \_\_\_\_\_ ID No. : \_\_\_\_\_

採取日時 : \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 ( AM ・ PM ) \_\_\_\_\_ 時 \_\_\_\_\_ 分

測定者名 : \_\_\_\_\_ ( 日 付 ) \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

確認者名 : \_\_\_\_\_ ( 日 付 ) \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

Memo(服用薬物名等) : \_\_\_\_\_

METH	THC	COC	ZOL	BZD	BAR	TCA
覚醒剤	大麻	コカイン系麻薬	ゾルピデム	ベンゾジアゼピン系	バルビツール酸系	三環系抗うつ薬
1	2	3	4	5	6	7

項目名	判定
1   METH 覚醒剤	+ / -
2   THC 大麻	+ / -
3   COC コカイン系麻薬	+ / -
4   ZOL ゾルピデム	+ / -
5   BZD ベンゾジアゼピン系	+ / -
6   BAR バルビツール酸系	+ / -
7   TCA 三環系抗うつ薬	+ / -

結果判定例

陰性(-)      陽性(+)

上のラインが1本のみ現れた場合が陽性です